

Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ULTRASONOGRAFI (AMI 1)		
	No. Dokumen 036	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIK.197712122008101003	Tanggal Terbit, 03/Jan/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Ultrasound Gel		
Prosedur	1. Nyalakan alat dengan menekan tombol power yg terletak di belakang kanan bawah warna hijau kemudian tombol atas samping kanan. 2. Biarkan alat menyala sampai tampilannya 3. Pilih jenis probe yang akan dipakai, pada sebelah kanan layar 4. Pilih jenis pemeriksaannya, sesuai dengan yang akan diperiksa (missal OB-Obstetric) 5. Tekan tombol "PATIENT", untuk mengisi identitas pasien 6. Klik "OK" pada kanan bawah layar 7. Klik "COMPLETED" pada tampilan yang muncul pada layer 8. Silahkan memulai ambil gambar 9. Tekan "FREEZE" untuk menghentikan tampilan gambar pada layar 10. Tekan tombol "CALC" untuk memunculkan menu pengukuran 11. Pilih jenis parameter yang akan dilakukan pengukuran, sesuai gambar 12. Tekan tombol "SAVE" untuk menyimpan hasil dari pemeriksaan 12. Tekan tombol "REPORT" untuk melihat semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan		

	13. Tekan tombol "SAVE" pada kanan bawah layar, untuk menyimpan hasil report pasien 14. Pergantian pasien : - Tekan tombol "PATIENT" - Isikan identitas pasien selengkap mungkin - Tekan "OK" pada kanan bawah layar Patient Report ANALOGIC MEDICAL 3 ANALOGIC MEDICAL AM11 - Klik "COMPLETED" pada tampilan yang muncul pada layar - Silahkan memulai ambil gambar 15. Membuka data pasien yang lalu : - Tekan tombol "PATIENT" - Klik "PATIENT LIST" pada kanan bawah layar - Pilih tampilan "PATIENT REVIEW" - Pilih satu pasien data dan klik 2kali untuk melihat hasil yang sudah tersimpan - Pilih data pemeriksaan yang akan dilihat, dan klik 2kali - Pilih dan klik 2 kali tampilan USG yang sudah tersimpan, untuk review hasilnya - Untuk keluar, tekan tombol "PATIENT" 16. Mematikan alat : - Tekan tombol yang ada di samping kiri alat - Biarkan alat mati sendiri - kemudian tombol power yang ada belakang bawah warna hijau 17. isi "logbook" setelah penggunaan alat
Unit Terkait	- Sub. Bagian Sarana dan Prasarana - Laboratorium Pendidikan