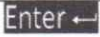


Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) USG SOGATA – SG 10 PREMIUM		
	No. Dokumen 051	No. Revisi	Halaman 1 dari 3
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIK.197712122008101003	Tanggal Terbit, 20/Aug/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Ultrasound Gel		
Prosedur Standar Operasional.	1. Pasang kabel Power dan Sambungkan tr.... Ke unit USG, Kemudian Hidupkan dengan menekan tombol Power . 2. Tekan tombol Patient . Untuk mengisi data pasien, lalu OK (tekan tombol Enter ) untuk menyimpan data pasien. 3. Tekan tombol PROBE  untuk memilih probe dan pemeriksaan. 4. Tekan tombol 2B untuk tampilan 2 gambar, dan tekan kembali untuk pindah gambar kekiri/kekanan. 5. Tekan tombol 4B untuk tampilan 4 gambar, dan tekan kembali untuk pindah ke gambar berikutnya. 6. Tekan tombol M untuk M Mode (pengambilan gambar jantung). 7. Tekan tombol B untuk kembali ke B mode. 8. Tekan tombol DISTANCE (DIST) untuk pengukuran panjang. 9. Tekan tombol CALCULATION (CALC), pilih untuk pengukuran OB, GS, CRL, BPD, AC, FL dll tekan Enter .		

10. Contoh : pilih BPD tekan **Enter**  arahkan titik pengukuran tekan **Enter** 
kemudian arahkan titik pengukuran 2. Untuk merubah letak titik
pengukuran 1 tekan tombol  kemudian tekan tombol **Enter** .
11. Tekan tombol Report  untuk melihat hasil pengukuran.
12. Tekan tombol Exit  untuk kembali.
13. Untuk Doppler tekan tombol fungsi  no 5 (PW) lalu tekan
tombol **UPDATE**  untuk memunculkan **GRAFIK**.
14. untuk memunculkan **Bodymark** tekan tombol  pilih gambar/icon
bodymark yang diinginkan menggunakan tombol fungsi  yang
berada pada bagian atas keyboard, kemudian arahkan posisi probe
menggunakan trackball dan memutar tombol menu .
15. Untuk menulis text pada tampilan USG tekan tombol **COMMENT** ,
ketik text yang diinginkan menggunakan KEYBOARD.
16. Untuk dapat memunculkan tanda panah pada tampilan USG tekan tombol
ARROW.
17. Untuk menghilangkan text, tanda panah, dan hasil perhitungan yang
terdapat pada tampilan USG tekan tombol **Delete** .
18. Untuk menyimpan gambar, tekan tombol **SAVE** .
19. Untuk menyimpan video tekan tombol **SAVE CLIP** .
20. Tekan tombol **Print**  untuk mencetak hasil pemeriksaan.
21. Untuk mengakhiri pemeriksaan tekan tombol **END** .
22. Untuk mematikan unit USG, tekan tombol gambar **Probe**  terlebih dahulu
kemudian tekan tombol **Power** , pilih YES lalu tekan **Enter** .

	10. Bersihkan timbangan dari sisa bahan penimbangan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. 11. Cabut steker dari sumber listrik. 12. Isi "logbook" setelah penggunaan alat. NOTE : "DILARANG MENGGESER ATAU MEMINDAHKAN TIMBANGAN" MAKSIMUM PENIMBANGAN 600gr
Unit Terkait	1. Sub. Bagian Sarana dan Prasarana 2. Laboratorium Pendidikan