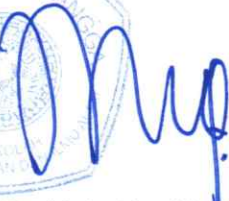


Status Dokumen	Induk ☐ Salinan ☐ No. Distribusi:		
 SIKIA UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URINE ANALYZER (Urisys 1100)		
	No. Dokumen. 053	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
Dibuat Oleh, Laboran SIKIA Universitas Airlangga Banyuwangi  <u>Sri Danardana, S.KH.</u> NIK.197712122008101003	Tanggal Terbit, 13/Des/2022	Disetujui Oleh, Wakil Direktur Non Akademik  <u>Dr. Mufasirin, drh., M.Si</u> NIP 196803291994121001	
Pengertian	Tata cara penggunaan alat yang baik dan benar di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Tujuan	1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 2. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi. 3. Standar baku pengoperasian alat di dalam laboratorium SIKIA Universitas Airlangga di Banyuwangi.		
Persiapan	1. Alat pelindung diri (jas laboratorium, masker, sarung tangan latex, desinfektan) 2. Pot sample. 3. Tissue		
Prosedur	Menyalakan Instrument Urisys 1100 1. Nyalakan (ON) alat → Self Check 2. Biarkan beberapa saat dan jika muncul "Repeat Calibration" → maka lakukan prosedur kalibrasi. 3. Jika langsung muncul "Insert Strip" pada display alat, maka alat siap digunakan untuk mengerjakan QC dan sample. Melakukan Kalibrasi 1. Urisys 1100 dikalibrasi tiap tujuh (7) hari, ditandai dengan alarm pesan muncul "REPEAT CALIBRATION" pada layar monitor 2. Jika muncul pesan "REPEAT CALIBRATION" → YES → Start Calibration 3. Jika status alat ready : "Calibr" → Start Calibration 4. Tempatkan strip kalibrasi (Control Test M) pada area pengerjaan (tray). Ujung strip kalibrator pastikan masuk ke dalam tray kurang lebih 2 mm → Tekan Start		